



**CERABIEN™ ZR**  
FC Paste Stain

**Доступен в 27 оттенках  
для работы с уже спеченным  
карксом из диоксида циркония**



*Cervical 1 + A+*

*A+*

*White*

*White*

*Light Gray + Dark Gray + Blue + White*

*Mamelon Orange 1 + White*

# Последовательность имеет значение



Виниры    Фронтальный коронки    Жевательные коронки    Мосты



**UTML** Ultra Translucent Multi-Layered  
**STML** Super Translucent Multi-Layered  
**ML** Multi-Layered    **HT** High-Translucent


**CERABIEN™ ZR FC Paste Stain** для спеченных каркасов доступен в широком ассортименте из 27 оригинальных оттенков.

Полный комплект для имитации зон прозрачности и опалесцентности: от тёмно-серого, до голубого. 3 пастообразные глазури: Clear (прозрачная), Glaze (обычная), и Value (яркая)  
 Комбинируйте в работах с KATANA™ Zirconia UTML, STML или ML для оптимизации эстетических реставраций из циркония.



CERABIEN™ ZR  
 FC Paste Stain

**Примеры окрасивания**

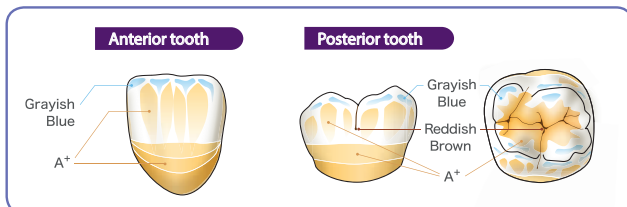

- Удобные в применении пастообразные внешние красители придают желаемый результат полноанатомической реставрации из диоксида циркония
- Доступен в 27 оттенках, точно передающих флуоресценцию естественных зубов
- Полный набор синих и серых оттенков для точной имитации прозрачности
- Можно обжигать при 750°C/1382°F, Температура ниже, чем обычная для внешних красителей
- Подходит для широкого спектра клинических применений, включая коронки из CZR и CZR Press



Translucent	<input type="checkbox"/> Glaze
	<input type="checkbox"/> Clear Glaze
Enamel	<input type="checkbox"/> Light Gray
	<input type="checkbox"/> Dark Gray
	<input type="checkbox"/> Grayish Blue
	<input type="checkbox"/> Blue

**27 оттенков FC Paste Stain**



Dentin	<input type="checkbox"/> Cervical 1	Adjustment	<input type="checkbox"/> Value
	<input type="checkbox"/> Cervical 2		<input type="checkbox"/> Black
	<input type="checkbox"/> Cervical 3		<input type="checkbox"/> Green 1
	<input type="checkbox"/> A+		<input type="checkbox"/> Green 2
	<input type="checkbox"/> B+		<input type="checkbox"/> Yellow
	<input type="checkbox"/> C+		<input type="checkbox"/> Salmon Pink
Enhancement	<input type="checkbox"/> D+	<input type="checkbox"/> Pink	
	<input type="checkbox"/> White	<input type="checkbox"/> Red	
	<input type="checkbox"/> Mamelon Orange 1	<input type="checkbox"/> Fluoro	
	<input type="checkbox"/> Mamelon Orange 2		
	<input type="checkbox"/> Earth Brown		
	<input type="checkbox"/> Reddish Brown		



Оригинальная градация Многослойного циркония

Синтеризация сырого циркония для одиночных реставраций из инновационного многослойного материала KATANA™ Zirconia всего за 90 минут!

**Режим обжига**

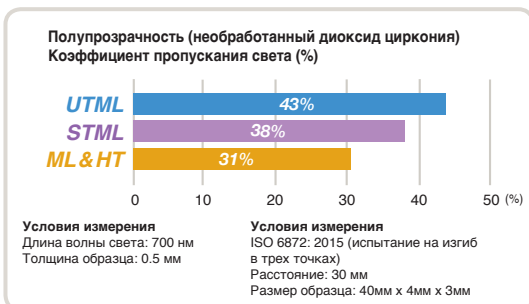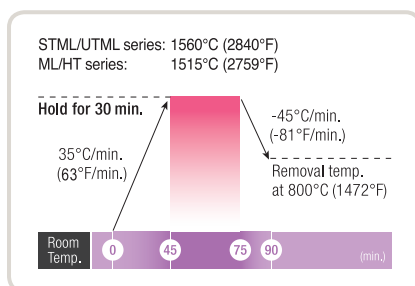

**Механические свойства**  
 Прочность на изгиб (МПа)

557 MPa  
 743 MPa  
 1125 MPa

**UTML** Ультра-прозрачные, многослойные

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4  
 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4  
 ENW EA1 EA2 EA3

**STML** Супер-прозрачные, многослойные

NW A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3  
 C1 C2 C3 D2 D3

**ML** Многослойные

A White A Light A Dark B Light C Light D Light

**HT\*** Высоко-прозрачные

HT10 HT12 HT13

\*Серия HT не является многослойной



The logo "MULTI LAYERED" represents original production technology of KATANA™ multi-layered materials.

Источник данных: Kuraray Noritake Dental Inc. Числовые значения варьируются в зависимости от условий.

ДО



ПОСЛЕ



KATANA™ Zirconia STML A2  
#7 KATANA™ Zirconia Виниры, #8 KATANA™ Zirconia Коронки  
Sean Park, MDC, DTG, Goldstein Garber & Salama Clinic (GG&S)

Передняя коронка  
с использованием FC Paste Stain  
изделие представлено Sean Park

KATANA™ Zirconia STML NW  
FC Paste Stains - Cervical 2, B+,  
White, Grayish Blue, Clear Glaze

Edgar Munoz, DTG, Elite Dental Studio

KATANA™ Zirconia STML C2  
FC Paste Stains - Earth Brown  
в трещинах, White, Cervical 2  
Окклюзия: Grayish Blue, Clear Glaze




KATANA™ Zirconia Full Upper Case

Фронтальные зубы из KATANA™ Zirconia UTML A1  
Жевательные зубы из KATANA™ Zirconia STML A1  
Использовались только красители и глазурь,  
без нанесения керамической массы  
Sean Han, CDT, Master's Arch  
Troy Schmedding, DDS




MASTER'S ARCH


## Минимальная толщина стенок реставраций из диоксида циркония KATANA™ Zirconia Фронтальные коронки, Виниры, Жевательные коронки, Вкладки/Накладки

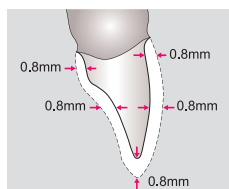**UTML**
**STML**


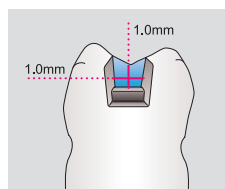
Anterior crown

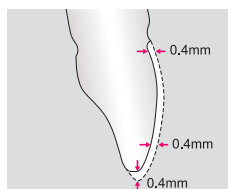


Veneer

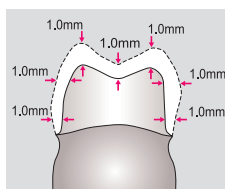


Posterior crown




Inlay

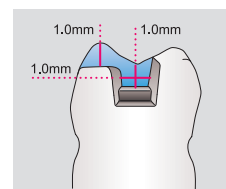


Onlay

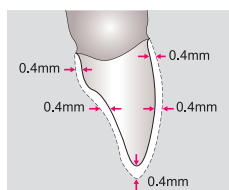**ML&HT**


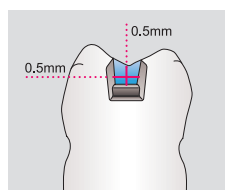
Anterior crown

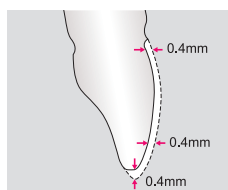


Veneer

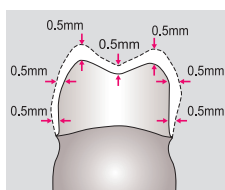

Posterior crown



Inlay

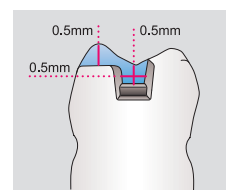

Onlay


**Kuraray Noritake Dental Inc.**

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan

 Website [www.kuraraynoritake.com](http://www.kuraraynoritake.com)

- Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Цвет на печатной продукции может немного отличаться от реального цвета.